



MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE: Lea este manual de instrucciones con atención antes de intentar el uso del equipo

Características Generales


El Dermadeep MULTIFUNCION, es un aparato complementario del Dermadeep-RF y del Derma Ultra NATURE, que permite ampliar las prestaciones de los equipos anteriormente mencionados.

Instalación y Conexión

Para conectar el Dermadeep MULTIFUNCION, se deberá retirar el cabezal del equipo Dermadeep-RF o Derma Ultra NATURE, y el correspondiente cable de POWER.

Desde ahora llamaremos equipo EMISOR, al Dermadeep-RF o Derma Ultra NATURE.


Coloque el aparato sobre el emisor de Radiofrecuencia (el Dermadeep MULTIFUNCION, posee patas magnéticas que evitarán que el mismo se deslice sobre el equipo emisor.

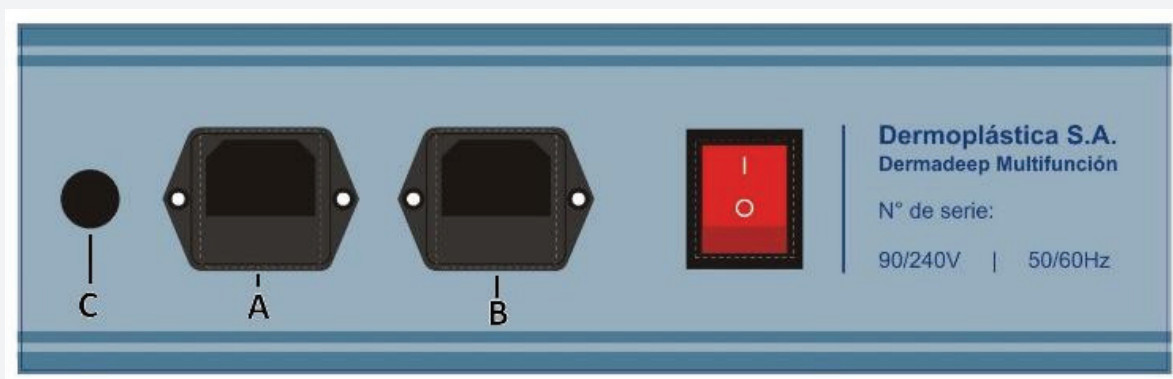

El Dermadeep MULTIFUNCION, es un aparato complementario del Dermadeep-RF y del Derma Ultra NATURE, que permite ampliar las prestaciones de los equipos anteriormente mencionados.

Conecte los cabezales, el cabezal bipolar en el conector "BIP" (D) y el cabezal Circuvalente en el conector "CIR" (F)

Pedal de accionamiento: El pedal provisto con el Dermadeep MULTIFUNCION, solo debe usarse en el caso de que el aparato EMISOR sea un Dermadeep-RF, conectándolo en la ficha " Hands Piece", en el caso del Derma Ultra NATURE, se deberá unicamente usar el pedal del antedicho equipo.

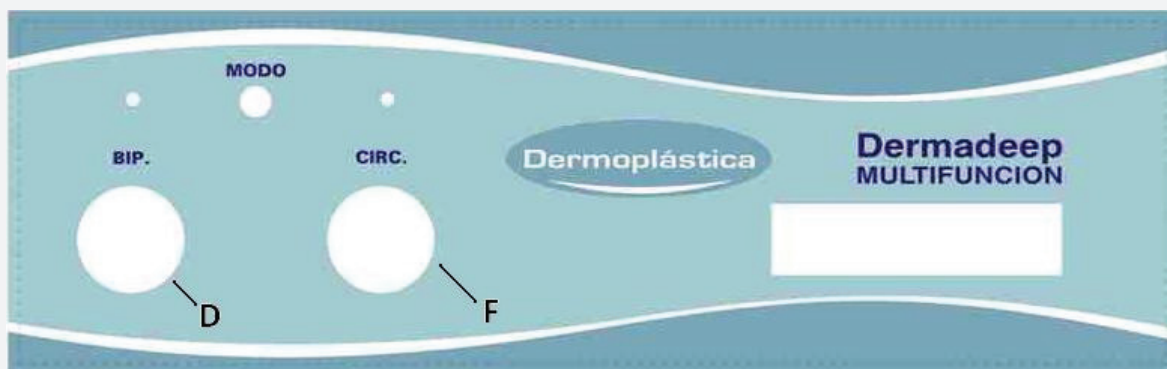

FELICITACIONES, su equipo Dermadeep MULTIFUNCION, ya se encuentra listo para ser operado.


Funcionamiento

1. Encienda el Dermadeep MULTIFUNCION, desde la llave de encendido que se encuentra en la parte posterior del aparato.
2. Seleccione con la tecla MODO le tratamiento que desea efectuar “Bipolar o Circuvalente”
3. Programe la potencia en el aparato EMISOR
4. Ingrese un valor de tiempo en el aparato EMISOR, cuando este sea un Dermadeep-RF
5. Aplique aceite neutro en la zona a tratar y utilice el equipo normalmente.

El cabezal (CF401):

ATENCIÓN: Debe tener colocada la correspondiente protección (aislantes TF401) antes de utilizarlo. Ver la sección instalación y funcionamiento del equipo.

La pieza de mano o cabezal posee un pulsador para iniciar la aplicación.


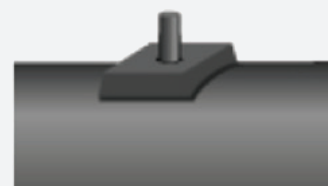


En la zona de apoyo se debe colocar un protector aislante (TF401) compuesto por un disco aislante 53 mm. de diámetro ubicándolo como se indica. Centrando el aislante para que cubra la totalidad del disco metálico.



En cuanto al uso de la pieza de mano hay algunos detalles a tener en cuenta que son importantes:

Durante el tratamiento, el cabezal (CF401) tiene que estar con la punta hacia abajo u horizontal, nunca hacia arriba. Es necesario que sea así para que agente refrigerante llegue correctamente al cabezal y el sensor de temperatura actúe adecuadamente, es por ello que el tratamiento se realiza con el paciente acostado en la camilla.

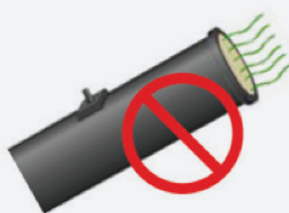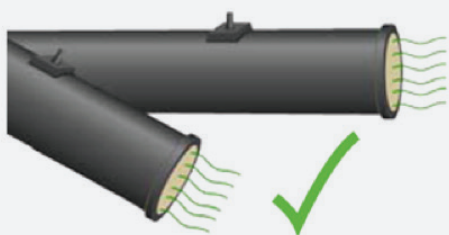

El refrigerante hace que la temperatura en la superficie de la piel en contacto con la punta descienda alrededor de 15°C produciendo una sensación de frescor

El cambio de aislante (TF 401) se realiza cada 10 pacientes, para realizarlo se retira el aro de fijación cuidadosamente y el TF401 usado, se limpia con un paño seco y limpio para eliminar los vestigios del adhesivo y se cubre con el nuevo TF401.

Limpieza y Mantenimiento

Para la limpieza del equipo, recomendamos utilizar un paño levemente humedecido y NO APLICAR, alcoholes o limpiadores cremosos en el frente del aparato.

El único mantenimiento que requiere el aparato, es el reemplazo de los aislantes (tips) autoadhesivos en los cabezales, recomendamos cambiarlos cada 20 sesiones.

GRACIAS , por adquirir Dermadeep MULTIFUNCION !!!

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESTA GARANTIA CUBRE POR EL TERMINO DE **DOS (2) AÑOS** TODO DEFECTO DE FABRICACION, COMO ASI LOS COMPONENTES UTILIZADOS, EXCLUYEN-DOSE TODO DAÑO PRODUCIDO POR EL USO DEFECTUOSO DE LA UNIDAD.

Nº DE SERIE:

MODELO: Multifunción

FECHA:

VENDEDOR:

DERMOPLASTICA S.A.